

## Einstufen-Schnelltest zur Eigenanwendung, zum frühen Nachweis einer Schwangerschaft

### GEBRAUCHSANLEITUNG

Core Technology Co., Ltd.

Der **CORE Schwangerschaftstest** (Streifenfest) zur Eigenanwendung in der In Vitro Diagnostik ist eine der einfachsten und schnellsten Methoden zu prüfen, ob eine Schwangerschaft vorliegt. Mit einer Empfindlichkeit von **10mIU/ml** und einer **Zuverlässigkeit des Ergebnisses von über 99%** ist der **CORE Schwangerschaftstest** CE und ISO zertifiziert (TÜV-Rheinland).

#### Wie funktioniert der CORE Schwangerschaftstest?

Der CORE SCHWANGERSCHAFTSTEST lässt sich sehr einfach, in nur einem Schritt durchführen; er weist das Hormon HCG im Urin nach. Die Zuverlässigkeitsquote des Tests beträgt über 99%. Nach 5 Minuten können Sie das Ergebnis selbst auf dem Teststreifen ablesen. Das Hormon hCG lässt sich im Urin nachweisen, sobald eine Schwangerschaft vorliegt. Schon beim ersten Tag des Ausbleibens der Regel, ist das hCG Hormon im Urin nachweisbar. Sie können den Test zu Hause selbst durchführen.

#### Der Test und das Schwangerschaftshormon (hCG)

Wenige Tage nachdem die Befruchtung der Eizelle stattgefunden hat, beginnt der weibliche Körper mit der Produktion des sog. Schwangerschaftshormons hCG (humanes Choriongonadotropin). Im Normalfall kann zwischen 6 und 15 Tagen nach der Befruchtung das hCG Hormon im Urin festgestellt werden. Dennoch hängt ein positives Testergebnis unter anderem auch von der Menge des Hormons hCG ab, das sich im Urin befindet.

#### BITTE LESEN SIE VOR DURCHFÜHRUNG DES CORE SCHWANGERSCHAFTSTESTS DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH.

#### WICHTIGE HINWEISE!

- Lesen Sie bitte diese Anleitung aufmerksam durch,
- bevor Sie den Test durchführen.
- Nur für den IN-VITRO Gebrauch.
- Nur zur äußeren Anwendung. Nicht verschlucken.
- Teststreifen unmittelbar nach der Entnahme aus der Folienpackung verwenden.
- **Test und Testbeutel STETS AUSSER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. Teststreifen darf nicht verschluckt werden.**
- Nach Gebrauch die Teststreifen mit dem normalen Hausmüll entsorgen.
- Bei beschädigter Folienpackung darf der Test nicht mehr verwendet werden.
- Der Teststreifen ist nur zum einmaligen Gebrauch geeignet. NICHT WIEDERVERWENDEN.
- Der Teststreifen darf NICHT geöffnet oder beschädigt werden.
- Test nach dem Ablaufdatum nicht mehr verwenden.

Sie können den Test zu jeder Tageszeit durchführen. Empfehlenswert ist es jedoch, den Schwangerschaftstest morgens durchzuführen, da der Morgenurin eine höhere HCG-Konzentration aufweist.

#### Inhalt der Packung:

- 1 Schwangerschaftstest (Streifenfest)
- 1 Tütchen Silicagel (Trocknungsmittel)
- 1 Gebrauchsanleitung

#### Zusätzlich benötigen Sie:

- ein sauberes und trockenes Gefäß, um den Urin aufzufangen
- eine Uhr (beides nicht im Lieferumfang enthalten)

#### TESTABLAUF DES CORE SCHWANGERSCHAFTSTESTS:

1. Vor Testbeginn sollten sowohl der Test (Teststreifen) als auch die

Urinprobe auf Raumtemperatur (15°- 30°C) gebracht werden.

2. Fangen Sie die Urinprobe in einem sauberen und trockenen Gefäß auf. Am besten gelingt dies, wenn Sie das Gefäß oder den Behälter in den Urinstrahl halten.

3. Öffnen Sie die Folienpackung an der seitlichen Aufreißschlitzen. Entnehmen Sie den Teststreifen.

4. Nehmen Sie den Teststreifen am oberen Ende in die Hand. Das Tütchen mit dem Trocknungsmittel entsorgen Sie bitte im Restmüll.

5. Tauchen Sie den Teststreifen in die Urinprobe bis zur Markierung „MAX“. Der Pfeil auf dem Teststreifen zeigt nach unten.


**BITTE BEACHTEN:** Den Teststreifen nicht über die MAXIMUMLINIE („MAX“) hinaus eintauchen. Dies könnte zu einem falschen Ergebnis führen.

6. Nehmen Sie den Teststreifen nach wenigen Sekunden (3-5 Sekunden) aus der Urinprobe heraus und legen Sie ihn auf einer glatten, sauberen und trockenen Oberfläche ab.

7. Warten Sie bis sich nach wenigen Sekunden die beiden Testlinien färben. Je nach Konzentration des HCG Hormons im Urin, kann ein Ergebnis bereits nach 40 Sekunden abgelesen werden. Jedoch um ein zuverlässiges Ergebnis zu erzielen, empfiehlt es sich die volle Einwirkzeit von 5 Minuten abzuwarten.

**WICHTIGER HINWEIS: Bitte lesen Sie das Testergebnis nach 3-5 Minuten ab, jedoch nicht später als nach 5 Minuten. Änderungen im Testfeld, die sich nach Ablauf von 5 Minuten ergeben, dürfen nicht berücksichtigt werden.**

#### AUSWERTUNG DES TESTS:

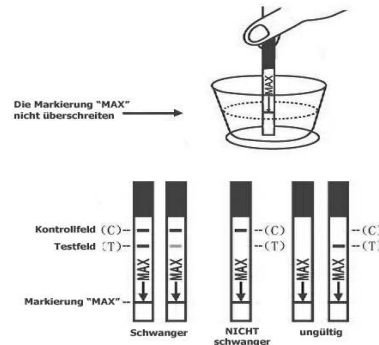

Zur Auswertung des Tests legen Sie den Teststreifen auf eine glatte, saubere und trockene Oberfläche ab. Im oberen Bereich des Testfelds erscheint eine farbige Linie, als Kontrolle für den korrekten Testablauf (C=Kontrolllinie). Im unteren Bereich des Ergebnisfelds erscheint das Testergebnis. Erscheint auch hier eine farbige Linie, so ist dies die Testlinie (T=Testlinie).

#### Negatives Ergebnis (nicht schwanger)

Erscheint nur **eine farbige Linie** im Testfeld, so bedeutet dies, dass kein erhöhter HCG-Spiegel festgestellt wurde.

#### Positives Ergebnis (schwanger)

Wenn im Testfeld **zwei farbige Linien** erscheinen, so wurde ein erhöhter HCG-Spiegel festgestellt. Dies deutet auf eine Schwangerschaft hin.

Wenn sich die Testlinie nur gering färbt, sollten Sie den Test nach 48 Std. wiederholen.

#### Ungültiges Testergebnis:

Wenn **keine farbige Linie im Kontrollfeld (C)** erscheint, so ist das Testergebnis ungültig, selbst wenn im Testfeld (T) eine Linie erscheint.

In diesem Fall wiederholen Sie bitte den Test mit einem neuen Teststreifen. Sollte das Testergebnis erneut ungültig sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, unter Angabe der LOT-Nummer, welche auf der Produktpackung aufgedruckt ist.

#### GRENZEN DES TESTS:

1. Wie jede Diagnose, sollte auch eine Schwangerschaft durch einen Arzt, nach Auswertung aller klinischen Untersuchungen und Laborergebnisse, bestätigt werden.

2. Mit einem Schwangerschaftstest lässt sich eine normale Schwangerschaft nicht von einer **ektopischen Schwangerschaft** (Eileiter-Schwangerschaft) unterscheiden. Auch eine spontane Fehlgeburt oder ein Schwangerschaftsabbruch können zu Fehlinterpretationen des Testergebnisses führen.

3. Ist die Urinprobe zu stark verdünnt (z.B. sehr frühe Schwangerschaft), so kann die HCG-Konzentration unterhalb der Nachweisgrenze liegen und das Testergebnis ist negativ. Liegt auch in diesem Fall der begründete Verdacht einer Schwangerschaft vor, sollten Sie den Test mit einer Probe aus Morgenurin nach 48 Stunden wiederholen.

4. Ein erhöhter HCG-Spiegel kann auch andere Ursachen haben. Den Schwangerschaftstest zum Nachweis des hCG Hormons im Urin, sollten Sie deshalb nur dann anwenden, wenn ein anderer Grund für einen erhöhten hCG-Spiegel auszuschließen ist. In jedem Fall sollten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt halten.

5. Empfängnisverhütende Methoden, welche auf hCG basieren, können ebenfalls zu falschen Ergebnissen führen. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

#### LAGERUNG UND HALTBARKEIT

- Bitte bewahren Sie den Testbeutel in der Originalverpackung ungeöffnet auf.
- Der Test kann bei einer Raumtemperatur von 2° - 30°C gelagert werden.
- Sollten Sie den Test kühl lagern, so bringen Sie in vor der Verwendung auf Raumtemperatur.
- Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums (auf der Folienpackung aufgedruckt, Monat/Jahr) sollten Sie den Test nicht mehr verwenden.
- Vor direktem Sonnenlicht, Hitze oder Feuchtigkeit schützen.
- Test nicht einfrieren.

#### FRAGEN und ANTWORTEN

##### Wie funktioniert der CORE Schwangerschaftstest?

Wenn eine Frau Schwanger ist, beginnt ihr Körper mit der Produktion des Hormons hCG (humanes Choriongonadotropin). Dieses Hormon wird mit ansteigender Konzentration im Urin ausgeschieden. Das Grundprinzip des CORE Schwangerschaftstest besteht in dem Nachweis des hCG-Hormons im Urin der Frau.

**Wann sollte der CORE Schwangerschaftstest durchgeführt werden?** Der CORE Schwangerschaftstest kann bereits ab dem ersten Tag des Ausbleibens der Menstruation durchgeführt werden.

##### Wann ist der beste Zeitpunkt, um den Test durchzuführen?

Der CORE Schwangerschaftstest kann zu jeder Tageszeit durchgeführt werden. Der Morgenurin enthält jedoch die höchste Menge an hCG-Hormon. Um das zuverlässigste Ergebnis zu erreichen, sollten Sie für den Test möglichst den Morgenurin verwenden.

##### Die Kontroll-Linie und die Testlinie sehen unterschiedlich aus. Ist dies von Bedeutung?

Nein, farbliche Unterschiede ändern nichts am Testergebnis.

##### Der Hintergrund färbt sich rosa und eine bewegte Verfärbung erscheint im Testfeld. Hat dies eine Bedeutung?

Nein. Jede Urinprobe sowie die Luftfeuchtigkeit im Raum hat eine andere chemische Zusammensetzung. Diese Unterschiede können einen rosafarbenen Hintergrund oder bewegte Verfärbungen verursachen. Dieses hat keinen Einfluss auf das Testergebnis. Wenn die Kontroll-Linie innerhalb von 5 Minuten erscheint, funktioniert der Test ordnungsgemäß.

##### Die Farbintensität der Linie im Kontrollfeld variiert. Ist dies von Bedeutung?

Nein, eine Abweichung in der Farbintensität der Linie im Kontrollfeld hat keinen Einfluss auf das Testergebnis.

##### Kann ich das Testergebnis auch später als 5 Minuten nach Durchführung des Tests ablesen?

Es empfiehlt sich das Testergebnis vor Ablauf von 5 Minuten abzulesen. Ein Ablesen des Testergebnis nach Ablauf dieser Zeit ist nicht zu empfehlen, da es zu falschen Ergebnissen führen kann.

##### Das Testergebnis ist positiv. Wie muss ich mich verhalten?

Wenn das Testergebnis positiv ist, sollten Sie Ihren Arzt oder Gynäkologen aufsuchen. Um die Gesundheit für Sie und Ihr Kind zu gewährleisten, ist es wichtig, dass dieser Schwangerschaftstest von Ihrem Gynäkologen bestätigt wird.

##### Das Testergebnis ist negativ. Wie muss ich verhalten?

Wenn das Testergebnis negativ ist, dann könnte kein hCG-Hormon im Urin nachgewiesen werden. Wenn Sie dennoch eine Schwangerschaft vermuten und sich Ihre Regel nicht innerhalb weniger Tage einstellt, sollten Sie den Test wiederholen. Sollte der Test auch diesmal zu einem negativen Ergebnis führen und Ihre Regel weiterhin ausbleiben, sollten Sie Ihren Gynäkologen aufsuchen. Dieser wird mit Ihnen besprechen, ob andere Gründe für ein Ausbleiben der Regel vorliegen.

##### Im Kontrollfeld erscheint keine Linie. Was bedeutet das?

Wenn im Kontrollfeld nach Ablauf von 5 Minuten keine Linie erscheint, so ist davon auszugehen, dass der Test nicht gewissenhaft durchgeführt wurde. Um ein richtiges Ergebnis zu erzielen, sollten Sie den Test wiederholen.

##### Wie zuverlässig ist der CORE Schwangerschaftstest?

Bei gewissenhafter Anwendung, unter aufmerksamer Befolgung der Gebrauchsanleitung, bietet dieser Test **eine Zuverlässigkeit von 99%**.

**CORE** HCG Schwangerschaftsteststreifen  
(Sensitivität: 10mIU/ml)

LOT 20110415 03/2013 CE 0197



Vor direktem Sonnenlicht schützen

Lagerung bei 2° - 30°C

Vor Nässe schützen

Nicht zur Wiederverwendung

Nur für „In-Vitro“ Diagnostik

Core Technology Co., Ltd., Room 100,C Building, No.29 Life Park Rd., Changping District, Beijing China 102206

Wellkang Ltd t/a Wellkang Tech Consulting, Suite B, 29 Harley Street, LONDON W1G 9QR, England, United Kingdom

Gebrauchsanleitung beachten

Vertrieb: [www.ovutest24.com](http://www.ovutest24.com)